

Caneta Tratamento de acidificação para verrugas

Leia atentamente as instruções antes de utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas, mesmo que já tenha utilizado o produto anteriormente. Guarde estas instruções de utilização para o caso de ser necessário consultá-las novamente. Para adultos e crianças (a partir dos 4 anos).

PARA QUE É UTILIZADO DR. YGLO CANETA TRATAMENTO DE ACIDIFICAÇÃO PARA VERRUGAS?

Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas é um dispositivo médico para o tratamento de verrugas comuns nas mãos e nos pés. Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas contém ácido monocloroacético, uma substância com efeito queratolítico na pele. A verruga dissolve-se, camada por camada. O ácido monocloroacético garante a destruição das células que contêm o vírus da verruga.

A vantagem de utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas é que a aplicação direta na verruga não causa dor, o que significa que também pode ser utilizada em crianças, quando aplicada corretamente por um adulto.

Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas só pode ser utilizada em verrugas comuns, cujas características são:

- Aparecem principalmente nas mãos e nos pés
- Têm a mesma cor que a pele
- A circunferência varia de menos de um milímetro a mais de um centímetro
- Geralmente surgem várias verrugas ao mesmo tempo
- A contaminação ocorre frequentemente por contacto direto, mas também através de toalhas ou superfícies infetadas
- Coçar e roer as unhas aumenta o risco de contaminação



Não utilize Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas em verrugas seborreicas

- Podem ter diferentes tamanhos e cores
- Circunferência média entre 0,5-1 cm
- Geralmente começam como uma mancha da cor da pele, amarela-acastanhada ou cinza-acastanhada. Depois aumentam e tornam-se mais espessas
- Parecem estar à superfície da pele e são fáceis de coçar. Contudo, estão firmemente aderidas à pele
- Podem surgir em qualquer parte do corpo, exceto nas palmas das mãos, plantas dos pés e lábios. Os locais mais prováveis de surgir são no peito, costas, rosto e pescoço



Não utilize Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas em verrugas plantares:

- Na planta/sola do pé
- Normalmente, são planas e estão rodeadas por uma pele áspera e espessa
- São semelhantes aos calos
- Podem conter pontos pretos ou pequenos grãos



Instruções de utilização (evitar queimaduras):

O que fazer:

- Aplicação deve ser feita por adultos
- Utilizar apenas nas mãos e nos pés
- Não utilizar noutras partes do corpo
- Aplicar vaselina ou pomada de zinco na pele em redor para a proteger
- Aplicar o produto apenas uma vez na verruga
- Tratar a verruga apenas uma vez por semana, de acordo com as instruções de utilização
- Certificar-se de que o líquido entra em contacto apenas com a verruga
- Evitar o contacto com a pele saudável
- Deixar o líquido secar completamente após a aplicação
- Deixar a verruga descoberta
- Resultados visíveis após 1 semana
- A aplicação em crianças deve ser efetuada por um adulto



- Manter fora do alcance das crianças

O que não fazer:

- Não aplicar em verrugas localizadas em qualquer outra parte do corpo para além das mãos ou pés
- Não aplicar em verrugas que estejam total ou parcialmente debaixo de uma unha
- Não aplicar em verrugas que estejam total ou parcialmente na planta dos pés (verrugas plantares)
- Não aplicar com as mãos a tremer ou com os dedos rígidos
- Não aplicar o produto na verruga mais do que uma vez.
- Não cobrir a verruga após a aplicação
- Não aplicar em marcas de nascença, molusco contagioso, feridas abertas, hiperpigmentação, verrugas seborreicas, verrugas plantares ou verrugas de cor escura, com pelos ou aparência estranha
- Não aplicar durante a gravidez ou a amamentação
- Não repetir o tratamento antes de um intervalo de uma semana



⚠ CUIDADOS

Não utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas:

- Em crianças com menos de 4 anos
- Se for sensível a um ou mais ingredientes
- No rosto (o líquido nunca deve entrar em contacto com os olhos ou com as membranas mucosas do nariz ou da boca)
- Evitar o contacto com os olhos. O contacto com os olhos pode causar cegueira
- Não esfregar ou tocar nos olhos com as mãos se o produto tiver sido aplicado nelas. Se o produto entrar nos olhos, procure ajuda médica de imediato
- Em verrugas genitais ou na área genital
- Em marcas de nascença, molusco contagioso, feridas abertas, nevus (sinais), verrugas seborreicas (castanhas), verrugas plantares e verrugas de cor escura, com pelos ou aparência estranha
- Em verrugas vermelhas, irritadas ou infetadas
- Imediatamente após remoção cirúrgica de verrugas, congelamento da verruga (crioterapia) ou tratamento a laser. Isto aplica-se em particular quando a pele fica vermelha ou dorida após o tratamento. Neste caso, terá de esperar pelo menos

4 semanas até que a vermelhidão ou inflamação da pele desapareça por completo. Só então pode utilizar novamente Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas

- Durante a gravidez ou amamentação
- Em verrugas que apareçam total ou parcialmente debaixo de uma unha
- Em verrugas que estejam total ou parcialmente na planta dos pés (verrugas plantares)
- Se tiver má circulação sanguínea: a área tratada em pessoas diabéticas e com má circulação sanguínea pode não cicatrizar tão rapidamente ou por completo

Tenha muito cuidado ao utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas:

- Em caso de dúvida quanto ao diagnóstico (a alteração da pele não pode ser claramente interpretada como uma verruga)
- Em caso de deficiência imunitária (por exemplo, se estiver a tomar medicamentos citostáticos)
- Nestes casos, não pode utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas antes de consultar um médico

⚠ ADVERTÊNCIAS

- Apenas para uso externo
- Utilizar com o máximo cuidado. O líquido de Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas é corrosivo
- Se a pele saudável entrar em contacto com o líquido, lave-a com água. Se apesar do cuidado a pele ficar irritada, será necessário seguir o mesmo tratamento de uma queimadura
- Contactar o médico se os sintomas não desaparecerem
- Fechar corretamente a caneta após a utilização e guardá-la numa posição vertical
- Manter fora do alcance das crianças
- Não é recomendada a utilização por crianças, idosos e pessoas com mobilidade limitada
- Evitar o contacto com a roupa, tecidos, toalhas de mesa ou pele
- Interromper a utilização se surgirem bolhas
- Trate a verruga no máximo uma vez e repita apenas se necessário, após um intervalo de uma semana

- O produto não deve ser utilizado após a data de validade
- O número do lote e a data de validade estão indicados na caneta, bem como na parte de fora da embalagem
- Não utilizar em várias pessoas, pois pode ocorrer contaminação cruzada do vírus
- Lavar as mãos (exceto a área tratada) imediatamente após a utilização
- Inspeccionar cuidadosamente o produto antes de cada utilização. Se parecer danificado, interrompa a utilização e deite-o fora
- O produto danificado pode apresentar fugas de líquido

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas pode causar alguns efeitos secundários, embora não se manifestem em todas as pessoas. Os efeitos secundários que podem ocorrer ao utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas são: pele irritada, sensação de ardor, vermelhidão da pele ou reações de hipersensibilidade. Se algum destes efeitos secundários se tornar grave ou se detetar efeitos secundários não mencionados nestas instruções de utilização, consulte o seu médico ou farmacêutico

INTERFERÊNCIA COM MEDICAMENTOS

Não há interações conhecidas com outros medicamentos

CONTEÚDO DE DR. YGLO CANETA TRATAMENTO DE ACIDIFICAÇÃO PARA VERRUGAS

Caneta de 3 ml com uma combinação de ácido monocloroacético (50%), água purificada e azul de metileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas a uma temperatura entre 15 e 25 °C, na embalagem original e fora do alcance das crianças

☞ A data de validade está indicada na parte inferior da embalagem.

Qualquer incidente grave relacionado com este produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do

Estado-Membro, onde o utilizador estiver localizado.

Para mais informações sobre Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas, visite www.dryglo.pt. Para todas as questões relativas ao produto, contacte o distribuidor.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os sinais e símbolos de aviso na embalagem e nas instruções de utilização são essenciais para garantir que utiliza o produto de forma segura, correta e para se proteger a si e aos outros de lesões. Os símbolos são explicados nesta tabela:

Símbolo	Explicação
	Símbolo do fabricante
	Símbolo que indica que deve consultar as instruções de utilização
	Símbolo do distribuidor
	Símbolo que indica que é necessário ter cuidado ao utilizar o dispositivo
	Símbolo da data de validade
	Símbolo que indica que o artigo é um dispositivo médico
	Aviso: substância corrosiva
	Símbolo que indica que o produto não está recomendado em menores de 3 anos
	Símbolo que indica que deve manter este produto fora do alcance das crianças
	Símbolo que indica que este produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou a amamentar
	Símbolo do número de lote
	Símbolo que indica que o produto deve ser armazenado entre 15°C e 25°C
	Símbolo que indica o identificador único do dispositivo

Como utilizar Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas (aplicação apenas por adultos)

Aplique Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas com o máximo cuidado.



A solução é corrosiva. Tenha muito cuidado ao aplicar nas partes das mãos e dos pés que são mais difíceis de alcançar. Isto aplica-se particularmente a pessoas com mobilidade limitada ou em caso de alterações nas funções motoras (mãos a tremer, dedos rígidos).



1. Antes de começar, proteja a pele saudável ao redor da verruga através da aplicação de uma camada espessa de vaselina ou pomada de zinco.
2. Segure Dr. Yglo caneta tratamento de acidificação para verrugas numa posição inclinada, como se estivesse a escrever. Não pressione nem aperte a caneta.
3. Coloque a ponta suavemente na verruga.
4. Aplique a solução duas vezes, cada vez durante cerca de 3 segundos (conte lentamente: 21, 22, 23).
5. Certifique-se de que a solução é aplicada apenas na verruga e não na pele em redor.
6. Após a aplicação, deixe a solução secar durante cerca de 5 minutos.
7. Quando estiver seca, remova cuidadosamente a vaselina ou pomada à volta da verruga.

8. Feche bem a caneta após a utilização e guarde-a num local seguro, fora do alcance das crianças.
9. Não cubra a verruga após a aplicação. Não trate a mesma verruga mais do que uma vez por semana.

O líquido precisa de uma semana para dissolver a camada superior da verruga, portanto os resultados não são imediatamente visíveis após a aplicação. Dependendo do tamanho e da espessura da verruga, pode ser necessário repetir o tratamento após uma semana. A duração média do tratamento é de cerca de 5 semanas. Não repita o tratamento num intervalo inferior a uma semana.

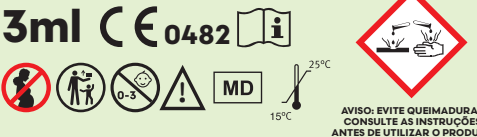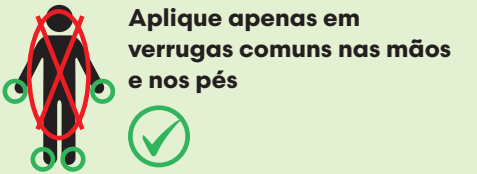

TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam,
The Netherlands

DISTRIBUIDOR:
Laboratórios Expanscience
Avenida Dom João II, 15 e 17, 3.º
andar, L-N, Loja 6 D
1990-078 Lisboa - Portugal